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





Produktcode



the simple tool

### Anwendung / How to use

Triggerpunkt / Triggerpoint

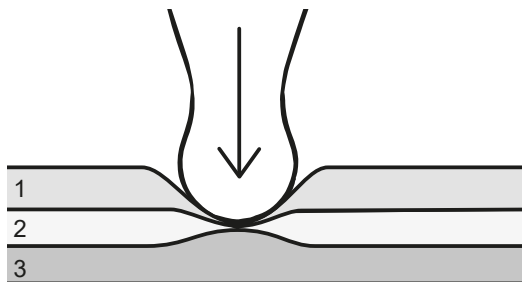


Druck bis zu 2 Minuten halten

*Hold pressure up to 2 minutes*

- 1 = Haut / Skin
- 2 = Tiefe Faszie / Deep fascia
- 3 = Muskel / Muscle

Fasziale Störung / Fascial Distortion

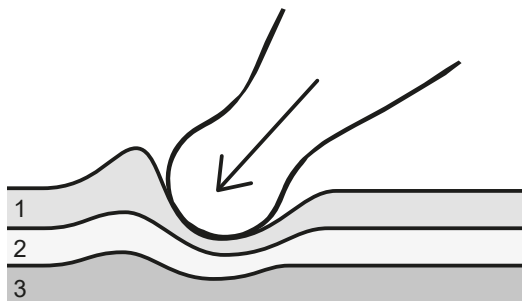

Tiefendruck, Gewebe langsam vor sich her schieben, so dass eine „Bugwelle“ entsteht, wiederholen

*Deep pressure, move slowly through the tissue producing a „bow wave“, repeat*

### Pflegetip / Care instructions

Regelmäßig mit Babyöl einreiben / Cover with baby-oil regularly

Hergestellt in Deutschland aus 100% FSC-zertifizierten Hölzern (tuev-coc-000816-083)  
Verpackung aus Recyclingrohstoffen

TriggerTracker® Tool Company, Furttenbachstr.14, 89077 Ulm  
[www.triggertracker.de](http://www.triggertracker.de)

